

テクニカルセンター ター消毒工程

ご利用者様宅



消毒待機



ご利用者様宅から戻ってきた福祉用具は消毒待機場所に集められます。お試し利用・長期間利用にかかわらず、同じ工程で消毒・点検が行われます。

1次消毒



高圧高温水(最高100度)を使用し洗浄と除菌殺菌を行ないます。高温水のため洗浄後の乾燥も早く、洗浄圧力も高いため隅々まで強力洗浄します。

2次消毒



1次洗浄の終わった商品をバクテリサイドにて滅菌消毒します。
バクテリサイドは、安定二酸化塩素の強力な酸化作用によって除菌・消臭を行い、安全性にも優れています。
3時間 バクテリサイド消毒

保管



密封梱包が終わった商品は、2F・3Fの保管庫に上がり、種目や機種によってそれぞれの棚に振り分けられます。
在庫欠品のないように、また品質を損なわないように保たれています。

特殊寝台



マットレス



車いす



手すり


急なご相談にも即時対応できるように徹底した管理を行なっています。



福祉用具は 搬出～消毒～点検～在庫～搬入それぞれの工程でバーコードチェックを行い、商品がどの状態にあるかが常に把握できます。また、修理履歴等も残る為、故障や事故を事前に予防することができます。

安心してご利用いただけるように徹底した管理を行なっております。

2次点検




1次点検後に、別のスタッフが再点検を行ないます。
細かな部分の汚れや、部品の劣化・破損がないか確認します。



1次洗浄の終わった商品をオゾン殺菌装置にて滅菌消毒します。
酸素を電気放電することで作られたオゾンガス(濃度10~20ppm)を室内に放出することにより、殺菌を行います。オゾンは空気に溶け込みやすく、環境にもやさしいものです。
5時間 オゾン消毒
3時間 オゾン分解

梱包



点検が終わった商品は、密封梱包され、保管庫へ移動します。
梱包前の商品をランダムに選び、外部の検査会社に委託し、残留細菌の検査を行なって品質の安全性をチェックします。(SRL社)

1次点検



2次洗浄の終わった商品をエタノールにて清拭し、あわせて作動チェックや部品交換を行ないます。
強い汚れ:アクアテクノ
排泄関係:サニバスター-S