

介護用
自動ラップ式トイレ

ラップポン・ブリオ

臭わず清潔

自動ラップ式トイレとは・・・
水を使わず、熱圧着によって自動で排泄物と臭いを密封する自動ラップ式排泄処理ユニットを搭載したトイレです。出てきたラップはそのまま燃えるゴミとして処分できます。

新機能②
処理終了までの時間表示

定価99,900円(税込)のところ

89,000円(税込)

<介護保険適用商品>

※上記の金額から1割または2割のご負担となります。

ラップポン・ブリオ 日本セイフティー (株)

- 寸法：幅48cm・奥行51cm ● 高さ80・83・86cm ● 座幅：42cm
- 床面から便座までの高さ：40・43・46cm
- 便座から肘掛までの高さ：21・24cm
- 重量：本体約21kg ● 材質：本体ラバーウッド（ウレタン塗装）
- 便座：発泡ポリエチレン ● 電源：AC100V…動作時75W以下・待機時5W以下

年度末（3月31日）で
特定福祉用具販売の支給限度額（年間10万円）は
リセットされます。

簡単手順



1. 専用凝固剤を入れる
排泄物の水分を凝固させるために使用します。



2. 作動ボタンを押す
排泄後、自動でラップを開始します。
「処理を開始します」と音声案内が流れます。
ラップ終了まで約90秒かかります。



3. ラップ済み袋を取り出す
終了音が鳴り、「処理が完了しました。トレーから袋を取り出してください」と音声案内が流れると切り離し完了です。
トレーを引いて、毎回ラップ済み袋を取り出してください。

別売り

ラップポン介護用消耗品セット



1セット60回分！
3,000円(税込)

★今なら初回分1セットは無料でお付けします★
※3月末納品分まで

こんな方におすすめ(導入事例)

- 独居またはご家族介助が困難で、バケツ処理が負担になる場合。
- 室内に臭いを広げず、清潔な環境で生活したい。

- ラップで個包装にしているため、バケツが必要ありません。処理負担が軽減されます。
- 排泄物を熱圧着により密封するため、室内への臭いの拡散を防止します。

お問い合わせは
株式会社 メディペック

- 金沢営業所 TEL 076-224-5600 FAX 076-224-6116
- 富山営業所 TEL 076-436-1521 FAX 076-436-1866

キャンペーン期間
3月31日まで