

# 腰痛でお悩みのスタッフの皆さまへ！ 仕事中も普段の生活も付けて安心！

例えばこんなとき・・・

- 同じ姿勢を長時間している
- 重労働や運動のし過ぎで筋肉疲労がある
- 冬場になると血行が悪くなる



## マックスベルト me2 — 腰部固定帯(マックスベルト) —



### 主な特長

- **メッシュタイプのスタンダードタイプ**
- 腰にフィットしやすい2本のS字軽量ステー採用
- 2種類のメッシュ素材を組み合わせることで通気性を向上
- 補助ベルトで症状に応じた圧迫力の調節が可能

## マックスベルト me black — 腰部固定帯(マックスベルト) —



### 主な特長

- **スポーティな黒で日常生活を快適に**
- 腰にフィットするS字軽量ステー2本内蔵
- 支持力を高める補助ベルトで安定感がアップ
- 汎用性が高くSSから4Lまでサイズ展開も充実

### 特別価格

商品名	サイズ	適用範囲(胴囲周)
● マックスベルトme2	SS	55 ~ 65 cm
	S	65 ~ 75 cm
● マックスベルトmeBlack	M	75 ~ 85 cm
	L	85 ~ 95 cm
	LL	95 ~ 105 cm
	3L	105 ~ 115 cm
	4L	115 ~ 125 cm

**1200円** (税込)

へその位置を目安に胴囲を計測して下さい。※計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きいサイズをお選びください。

### 【ご注文書】

お名前

商品名/サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	計	小計
マックスベルトme2	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	円
マックスベルトmeBlack	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	円
					合計	枚			円


### 注文書の送付先・連絡先

#### 株式会社メディペック

- 金沢営業所 TEL 076-224-5600 FAX 076-224-6116
- 富山営業所 TEL 076-436-1521 FAX 076-436-1866
- 福井営業所 TEL 0766-24-1112 FAX 0766-24-2202

キャンペーン期間: 2018.2.20まで

## サイズの選び方

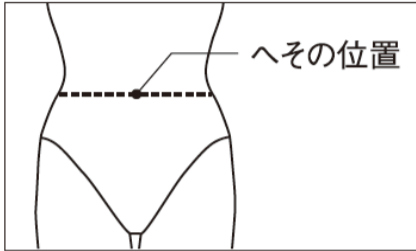


### ●サイズの選び方

胴囲に合わせて選んでください。胴囲はへその位置を目安に計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。


## 正しい装着方法

胃を圧迫しないように

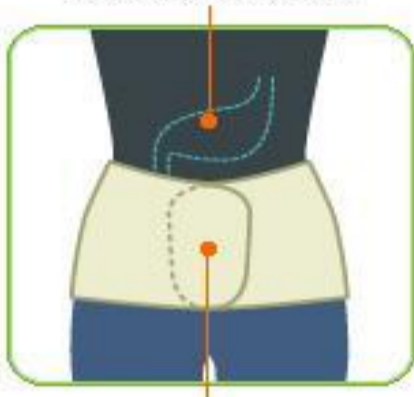


前合わせはきちんと重ねて

補助ベルトがある場合は  
左右均等な位置にとめる

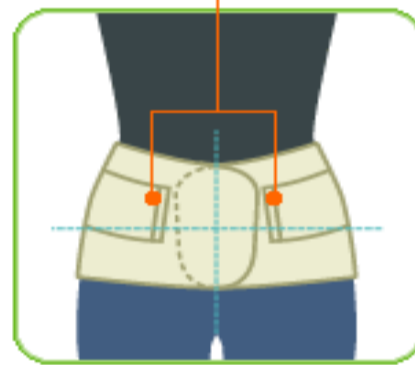


つける位置は正確に

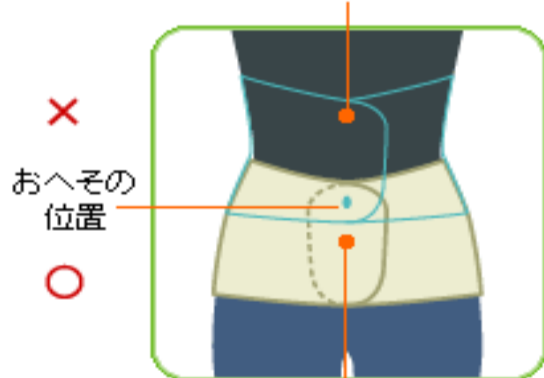

腹巻きのようにつけるのではなく  
おへその位置を基準にしましょう

背骨は二本のステーの間に

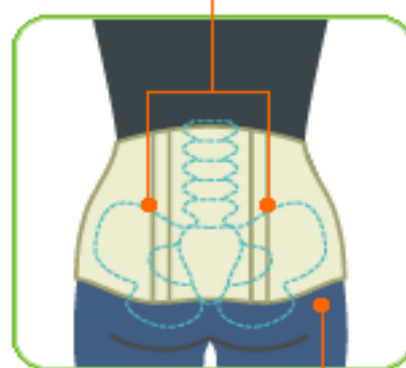

ベルトの下端は骨盤にかけて